



Giardien Test

Immunchromatographischer Schnelltest für Hunde und Katzen

Qualitativer Nachweis von Oberflächenantigenen von Giardia-Zysten und Trophozoiten.



- Nachweis von *Giardia duodenalis* (*Giardia lamblia*, *Giardia intestinalis*)
- Erkennt zuverlässig geringste Erregerkonzentrationen
- Eindeutiges Ergebnis innerhalb von 10 Minuten
- Besonders hygienische Anwendung
- Leicht abzulesendes Testergebnis dank Latex-Technologie
- Einfache Lagerung bei Raumtemperatur



Symptome wie wiederkehrende Durchfälle, meist wässrig oder blutig, Blähungen sowie Gewichts- und Appetitverlust, können Hinweise auf eine Giardiose sein. Eine schnelle und gezielte Behandlung ist dann unmittelbar erforderlich. Der Giardien Schnelltest dient als diagnostisches Hilfsmittel und erster Hinweisgeber. Er verfügt über eine besonders hohe Sensitivität und liefert ein schnelles sowie eindeutiges Ergebnis.

Einsatzgebiet:

Nachweis von *Giardia duodenalis* (*Giardia lamblia*, *Giardia intestinalis*)

Anwendung:

Den Kot mit Hilfe des Wattestäbchens in das Teströhrchen geben. Im Reagenz auflösen, schütteln und drei Tropfen auf das Probenfeld der Testkassette geben. Das Ergebnis ist nach 10 Minuten ablesbar.

Sollte der Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigen, ist in jedem Fall von einer Infektion auszugehen. Leben mehrere Tiere in einem Haushalt, sollten alle Tiere auf Giardien getestet werden.

Anwendungsdauer:

Um eine Giardiose ausschließen zu können, sollten drei Kotuntersuchungen über einen Zeitraum von sieben bis zehn Tagen durchgeführt werden. Konnte eine Giardiose nachgewiesen werden, wird empfohlen, den Test 2 – 3 Wochen nach erfolgter Behandlung zu wiederholen, um eine mögliche Neuinfektion aus der Umwelt auszuschließen.

Hinweise:

Nur zum Einmal-Gebrauch. Bei jeder Testung ist eine neue Testkassette und ein neues Probenröhrchen zu verwenden. Nach Öffnen des Aluminiumbeutels ist die Testkassette innerhalb einer Stunde zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Testkassette während der gesamten Durchführung auf einer waagerechten Fläche liegt. Beachten Sie die benötigte Kotmenge. Zu viel Kot kann das Testergebnis verfälschen. Bitte angegebene Auswertungszeit beachten. Testkassette nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Haltbarkeit:

36 Monate

Handelsform:

[1 x 10 Stück]

10 x Testkassette, 10 x Wattestäbchen, 10 x Laufpuffer, 1 x Gebrauchsinformation